

KwikPen – der handliche Fertigpen von Lilly




Gebrauchsanleitung

Wie Sie den KwikPen richtig nutzen,
zeigen wir Ihnen
auf den folgenden Seiten.

Diese Broschüre darf nur in Verbindung mit einer
Verordnung des Lilly KwikPen abgegeben werden.

Vorbereitung und Entlüftung

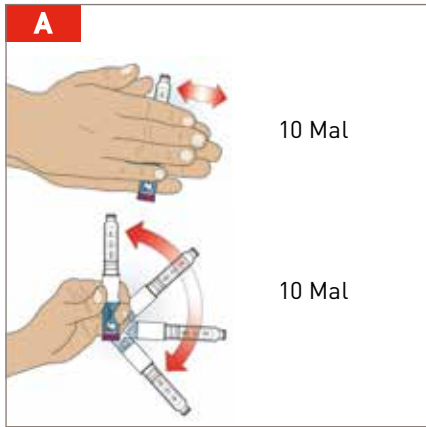


A. Schutzkappe entfernen und Insulin mischen

Falls Sie eine Insulinsuspension (milchiges Aussehen) verwenden: Rollen Sie den Pen vorsichtig zehnmals zwischen den Handflächen und drehen Sie den Pen vorsichtig zehnmals hin und her, um das Insulin zu einem einheitlichen, milchigen Aussehen zu durchmischen.



B. Nadel aufsetzen


Setzen Sie die Nadel gerade auf den Pen und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn (rechts herum), bis diese fest sitzt.

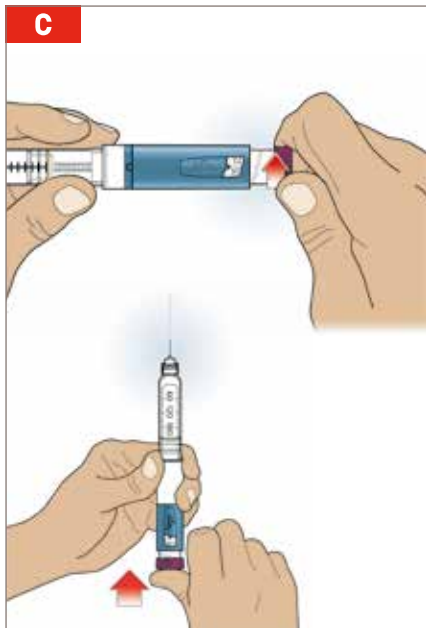

C. Entlüftung des Pens


Stellen Sie durch Drehen des Dosierknopfes zwei Einheiten ein. Halten Sie den Pen so, dass die Nadel nach oben zeigt. Klopfen Sie behutsam mit dem Finger gegen den Insulinpatronenhalter, so dass etwaige Luftblasen nach oben steigen. Drücken Sie den Dosierknopf bis zum Anschlag und halten Sie ihn 5 Sekunden lang gedrückt. Der Pen ist korrekt entlüftet, sobald Insulin als dünner Strahl aus der Nadel austritt. Tritt kein Insulin aus, wiederholen Sie die Entlüftung (Schritt C). Kommt es immer noch zu keinem Insulinfluss, wechseln Sie die Nadel und wiederholen Sie die Entlüftungsschritte.

Dosiseinstellung und Injektion

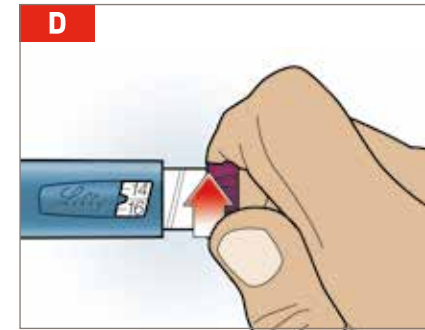


D. Dosis einstellen

Drehen Sie den Dosierknopf bis zu der Zahl an Einheiten, die Sie spritzen müssen. Sollten Sie zu viele Einheiten eingestellt haben, können Sie ohne Insulinverlust die Dosis korrigieren, indem Sie zurückdrehen. Eine Dosisumrechnung ist bei keinem KwikPen notwendig. Ein Umfüllen aus dem KwikPen heraus ist nicht erlaubt.

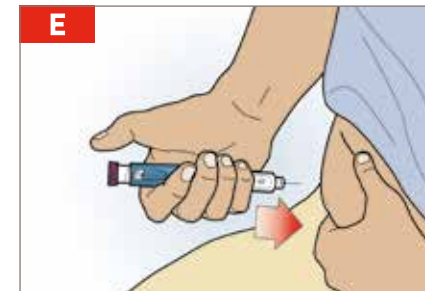

E. Dosis injizieren

Stechen Sie die Nadel ein, drücken Sie den Dosierknopf fest bis zum Anschlag und halten Sie ihn 5 Sekunden lang gedrückt, bevor Sie die Nadel wieder herausziehen.

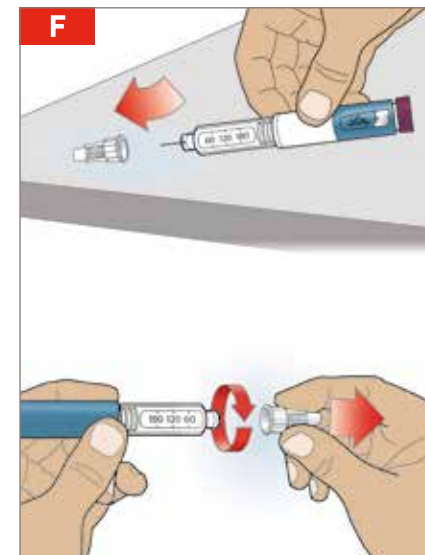

F. Nadel entfernen


Setzen Sie die äußere Nadelschutzhülle wieder auf. Schrauben Sie die äußere Nadelschutzhülle mit der Nadel ab und entsorgen Sie diese gemäß den Anweisungen Ihres Arztes.

BITTE JEDE NADEL NUR EINMAL VERWENDEN.

Dies ist eine verkürzte Handhabungsanleitung zum KwikPen. Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformation, die jeder KwikPen Packung beiliegt.

Die Farbe des Penkörpers und des Dosierknopfes unterscheidet sich je nach Insulintyp.

Einzelteile des KwikPen*

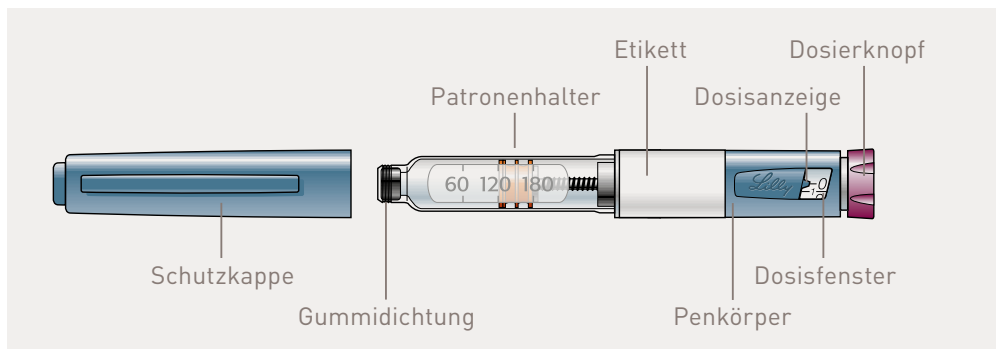

*Die Farbe des Penkörpers und des Dosierknopfes unterscheidet sich je nach Insulintyp.
Bei den verschiedenen KwikPens können einzelne Teile optisch leicht abweichen.

**Bitte beachten Sie
bei jeder Anwendung
Ihres KwikPen:**

- Benutzen Sie jedes Mal eine neue Nadel.
- Entlüften Sie den Pen.
- Überprüfen Sie, ob Sie die volle Dosis injiziert haben.
- Entfernen Sie die Nadel direkt nach der Injektion.

Lilly Deutschland GmbH
Werner-Reimers-Straße 2-4
61352 Bad Homburg

Lilly-Pen-Hotline: 0800-54559736

Leben so normal wie möglich

www.lilly-pharma.de
www.lilly-diabetes.de

Lilly

DEDVC00072(1)